



Liebig-Hlapilnik

Sestavni deli hlapilnika:

- 300 ml plastenka za 85% mravljično kislino z merilno skalo
- kapalnik
- *perforiran papir- stenj (pakiranju so proloženi 4 lističi, za zdravljenje uporabite en listič, ki ga po priloženih navodilih prilagodite glede na vrsto in velikost panja ter največjo pričakovano zunanjo temperaturo)
- osnovna plošča

Kratek opis:

- prilagojena velikost papirja se namesti na osnovno ploščo
- plastenka z odmerjeno količino mravljične kisline se obrnjena navzdol namesti na osnovno ploščo s papirjem
- mravljična kislina preko kapalnika počasi kaplja na papir, ki jo absorbira
- iz omočenega papirja mravljična kislina hlapi v panj

*Izhlapevanje mravljične kisline se glede na zunanje vplive (vrsta in velikost panja, temperatura) prilagodi s spreminjanjem velikosti perforiranega papirja.



*možno je naročilo dodatnega perforiranega papirja-stenja(40 kom v pakiranju).



Zastopnik za Slovenijo:

GENERA SI d.o.o.

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 4364466

E-mail: info@generasi.si

